

## KAKŠNA JE VLOGA UŠESNEGA MASLA

Ušesno maslo varuje uho pred okužbami, prahom in tučki. Vzdržuje naravno mikrobo floro na površini kože zunanjega sluhovoda. Prav tako maže bobnič, ki bi sicer postal trd in tog. S tem omogoči dober prenos zvoka.

## ZAKAJ JE HIGIENA UŠES TAKO POMEMBNA

V normalnih razmerah se ušesno maslo pomika proti zunanjemu delu sluhovoda, zahvaljujoč gibanju, ki ga povzroča žvečenje. Vsaka okvara v tem procesu vodi h kopičenju ušesnega masla. Posledica tega so zamaški, ki povzročajo slabšo slišnost, šumenje v ušesih ali vrtoglavico.

Uporaba raztopine za ušesno higieno A-cerumen pripomore k ohranjanju čistosti zunanjega sluhovoda in preprečuje nastanek ušesnih zamaškov.

## KAJ JE A-CERUMEN

A-cerumen je raztopina za ušesno higieno, ki vsebuje površinsko aktivne sestavine. Priporočen je za uporabo pri otrocih starosti nad 6 mesecev in pri odraslih.

- Pri redni uporabi olajša odstranjevanje odvečnega ušesnega masla in preprečuje nastanek zamaškov.
- Raztaplja zamaške iz ušesnega masla.

## KAKO DELUJE A-CERUMEN

A-cerumen navlaži in raztopi zamaške iz suhega čvrstega ušesnega masla. Po odstranitvi zamaška se ponovno vzpostavi naravno izločanje ušesnega masla, ki ščiti sluhovod.

## PAKIRANJE 10 x 2 ml

v plastenkah za enkratno uporabo, ki omogočajo enostavno in varno uporabo.

## SESTAVA

Površinsko aktivni snovi (natrijev acil sarkozinat in sladkorni ester), sredstvo za vzdrževanje vlage, barvilo rastlinskega izvora, podlaga (do 100 %).

Ne vsebuje konzervansov. Obarvana raztopina naravnega izvora.

## UPORABA

Za redno higieno: uporabite 2-krat na teden.

Pri ušesnih zamaških: uporabite zjutraj in zvečer 3 do 4 dni zapored.

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Nagnite glavo na stran.
2. V izpostavljeno uho iztisnite polovico vsebine plastenke.
3. Zmasirajte predel za ušesno mečico in pustite, da deluje 1 minuto.
4. Vrznavajte glavo, da se raztopina in ostanki ušesnega masla izločijo. Nato sperite\* in obrišite ostanke izločka.

\*Sperite s fiziološko raztopino ali čisto vodo.

## OPOZORILO

Vsebinsko plastenke porabite v 24 urah po prvem odprtju plastenke.

Ne shranjujte v hladilniku.

Shranjujte pri temperaturi od 10 do 40 °C.

Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na plastenki.

Ne uporabljajte, če je plastenka poškodovana.

## PREVIDNOSTNI UKREPI

Konice plastenke ne namestite pregloboko v sluhovod, da ne pride do draženja.

Pripomočka ne uporabljajte pri osehah s predrtim bobničem, pri ušesnih okužbah ali pri vstavljenih ušesnih cevkah.

Pri bolečinah v ušesih se posvetujte z zdravnikom.

Pazite, da ne pride v stik z očmi.

Ne zaužijte.

## SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!